



DISEÑADA Y  
FABRICADA  
EN ESPAÑA

# emoción

 **ADARRA**

LAN TRESNAK - SUMINISTROS INDUSTRIALES



TALLAS ADULTOS  
**NORMAL / GRANDE**

TALLAS KIDS  
**6-9 / 10-12**

**BOLSA INDIVIDUAL  
CON DATOS TÉCNICOS  
Y CIERRE ZIPPER PARA  
SU CONSERVACIÓN**

**COMPARTIENDO  
EMOCIONES**

DISEÑADAS Y FABRICADAS  
CON MUCHO MIMO EN ESPAÑA

Sedex Member



Con **EMOTION** hemos creado una mascarilla adaptada a nuestra realidad actual tanto en Eficacia de Filtración Bacteriana (BFE) como en dar respuesta a las necesidades de las personas en diferentes aspectos importantes para su vida diaria y para el desarrollo de las relaciones sociales.

**EMOTION** es vida para las personas: volver a poder expresar sentimientos, volver a respirar, volver a escuchar y ser escuchado, es proteger el planeta en el que vivimos...

Estos son los valores que defendemos con **EMOTION**:

#### EXPRESION FACIAL:

Ver y poder interpretar las expresiones faciales y los sentimientos de las personas.

#### EXPRESION AUDITIVA (NO PÉRDIDA DE DECIBELIOS AL HABLAR):

Hablo y me escuchas, hablas y te escucho: **CONECTAMOS...** y conectar es fundamental en las relaciones sociales. Las personas somos animales sociales (*"El Ser humano es un ser social por naturaleza"* - Aristóteles).

#### RESPIRABILIDAD:

- Para los niños y niñas cuando juegan, corren... viven con intensidad la vida y para ello necesitan respirar de manera plena.
- Para las personas con dificultades respiratorias.
- Para hacer deporte.
- Para TODOS... respirar es fundamental.

#### DURABILIDAD:

Fundamental para el medio ambiente y nuestro mundo = **VIDA.**

Vida para nuestra tierra es vida para nosotros y futuras generaciones.

#### DISEÑO:

Gracias a nuestro diseño y patrón de mascarilla así como por su composición, con **EMOTION** respiras a través de la mascarilla, por lo tanto, prácticamente todo el aire que respiras está filtrado. Con **EMOTION** respiras bien y respiras a través de la mascarilla.



TEJIDO LIGERO  
Y TRASLÚCIDO



EXCELENTE  
RESPIRABILIDAD



REUTILIZABLE



FILTRACIÓN  
BACTERIANA



NO EMPAÑA  
GAFAS



DISEÑO CON  
TWISTBAND



COMUNICACIÓN  
AUDITIVA



DISEÑO CON  
AJUSTADOR  
DE GOMA

#### CONFECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

TEXCON Y CALIDAD, S.L. - B-45769817  
Ctra. Calera Km. 4.2 Urb. El Madroño  
45694 Talavera la Nueva (Toledo)  
T. +34 925 85 05 45  
direccion@texconycalidad.com  
puntosdeventa@texconycalidad.com

[www.mascarillaseemotion.com](http://www.mascarillaseemotion.com)

**EMOTION** es una mascarilla libre de ARILAMINAS - Libre de Formaldehído.

- Arilaminas. Conforme a UNE EN 14362-1.
- Formaldehído. Conforme a ISO 14184-1.

**EMOTION** es una mascarilla con un PH analizado conforme a la ISO 3071, con resultado positivo, de forma que es un producto que no irrita la piel.

- PH in textile samples. Conforme a ISO 3071.

**EMOTION** es una mascarilla con certificado de alergénicos (Determination of allergeneus Dyes By HPLC - MSMS). Certificado CL-1571\_21-003575.

**EMOTION** es una mascarilla que no empaña las gafas.

**EMOTION** es una mascarilla diseñada y fabricada 100% en España.

**EMOTION** es una mascarilla fabricada en **TEXCON Y CALIDAD**, empresa que cuenta con el Protocolo **AENOR** frente al Covid.

**EMOTION** es una mascarilla fabricada en **TEXCON Y CALIDAD**, que cuenta con la auditoría **SMETA** que certifica la calidad de **TEXCON Y CALIDAD** en la práctica empresarial responsable, cubriendo cuatro áreas: trabajo, salud y seguridad, medio ambiente y ética empresarial.



#### CONFECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

TEXCON Y CALIDAD. S.L - B-45769817.  
Ctra. Calera Km. 4.2 Urb. El Madroño.  
45694 Talavera la Nueva (Toledo)  
T. +34 925 85 05 45  
direccion@texconycalidad.com  
puntosdeventa@texconycalidad.com  
[www.mascarillasemotion.com](http://www.mascarillasemotion.com)



## MASCARILLA CONFORME A LA ORDEN CSM/115/2021

Mascarilla ensayada por laboratorios AMSLAB (Applied Mass Spectrometry Laboratory) según norma Europea CWA 17553:2020. Ensayos de laboratorio: 21-002396, 21-002434, 21-003575, 21-002930 y 21-002739.

## COMPOSICIÓN MASCARILLA

Tejido principal 100% poliamida y tejido secundario 65% políester - 35% algodón.

## RESULTADOS BFE

(TEST METHOD: EN 14683:2019 + AC:2019) ANNEX B

Antes de lavados	95 %
Después de 5 lavados	92,1 %
Después de 20 lavados	88,1 %
Después de 30 lavados	86 %
Después de 40 lavados	84,4 %
Después de 50 lavados	82,4 %

Cumple CWA 17553:2020 nivel 70%

## RESULTADOS RESPIRABILIDAD

(TEST METHOD: EN 14683:2019 + AC 2019) ANNEX C

Antes lavados	1 Pa/cm <sup>2</sup>
Después de 50 lavados	1 Pa/cm <sup>2</sup>

## DETERMINATION OF AIR PERMEABILITY BY ISO 9237

Original	> 1000 l/m <sup>2</sup> /seg
After 50 washing cycles	> 1000 l/m <sup>2</sup> /seg

## DETERMINATION OF ARYLAMINES

(UNE EN 14362-1) ..... PASS

## DETERMINATION OF FORMALDEHYDE

BY PHOTOMETRIC (ISO 14184-1) ..... PASS

PH IN TEXTILE SAMPLES (ISO 3071) ..... PASS

**ADVERTENCIA:** Este dispositivo no es un producto sanitario ni un equipo de protección individual (EPI). Este producto está destinado a población sin síntomas de enfermedad. Solo debe ser utilizado por una persona y no transferido. No se recomienda el uso de mascarillas a personas con alguna enfermedad respiratoria, personas inconscientes, discapacitadas o que por cualquier otra razón no pueda quitarse la mascarilla sin ayuda. Todo menor de edad deberá ser supervisado por un adulto a la hora de la colocación, uso, retirada y eliminación de la mascarilla. Plazo recomendado para su uso: 4 horas. Después se debe proceder a su lavado. Una vez realizados 50 lavados esta mascarilla se debe desechar en un contenedor de restos. Este producto, dadas sus características, no admite devoluciones.

## INSTRUCCIONES DE LAVADO Y DE SECADO



Lavado suave a 60°



No usar lejía



No lavar en seco



Planchar a 110°

50

Nº máximo de ciclos de lavado

Lavar antes de usar.  
Con los lavados el tejido modifica su aspecto original

Secado al aire



**DISEÑO CON AJUSTADOR DE GOMA PARA UNA MEJOR SUJECCIÓN**

## CONFECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

TEXCON Y CALIDAD, S.L - B-45769817  
Ctra. Calera Km. 4,2 Urb. El Madroño  
45694 Talavera la Nueva (Toledo)  
T. +34 925 85 05 45  
direccion@texconycalidad.com  
puntosdeventa@texconycalidad.com  
[www.mascarillasemotlon.com](http://www.mascarillasemotlon.com)